


LCD走廊显示屏说明书

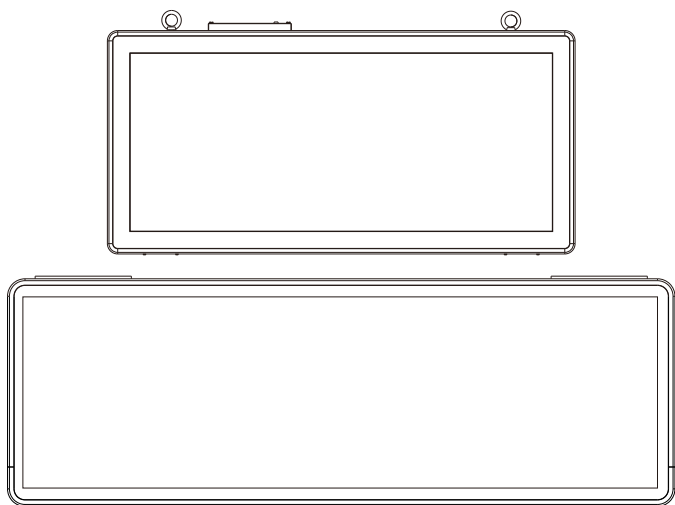

欢迎选用我公司的LCD走廊显示屏产品！

BC252L25/BC252L29LCD走廊显示屏采用当今最先进的电子通信技术设计，以优良的SMT工艺生产，经过严格的质量保证体系的测试与检验具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点，为值得信赖的医护对讲产品。

二、产品连接确认


产品在安装过程中，需根据实际应用情况，将电源线连接到电源上，并用标准网线将LCD走廊显示屏连接到局域网的交换机上。

三、产品快速设置

产品接上电源启动后，在顶部的USB接口插上鼠标，用鼠标点击屏幕下方的按钮，返回安卓系统主页面。点击【Settings】打开系统设置页面，点击【More】，打开更多功能页面，点击【Ethernet】，打开以太网设置页面，点击【Ethernet IP mode】，进入IP获取模式页面，点击【static】，进入静态IP设置界面。填写正确的IP地址、子网掩码和网关，点击【CONNECT】即可修改IP。修改后点击屏幕底部的打开任务切换界面，如下图，点击“Medical” APP返回LCD主界面。注意：设置IP时必须跟护士站的房号表中LCD走廊显示屏的IP地址一致，否则可能无法使用。

测试LCD走廊屏是否连接正常：在电脑上打开护士站软件，等待1~2分钟，查看LCD屏上的日期时间是否能自动跟电脑同步，如能同步，点击“数据信息->中文显示屏信息发布”，在设备名称中选择该LCD屏，在内容中输入要发布的字符串，点击【发送】按钮，稍等片刻，如果LCD屏接收到字符串，则表示连接正常。

四、安装说明

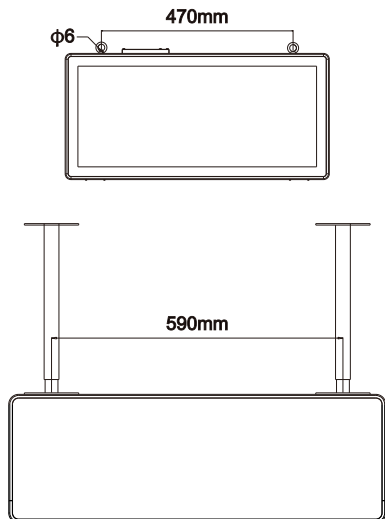


- 1.按图纸两圆环间直径距离在墙顶面安装铁链
- 2.将圆环挂在铁链上即可安装完毕


装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

序号	名称	数量	备注
1	走廊显示屏	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	
4	配件包	1套	配件包单独包装，内含：挂板、电源线、电源适配器、配线等。不同型号产品配件包可能有所不同，以实物为准。

一、产品介绍

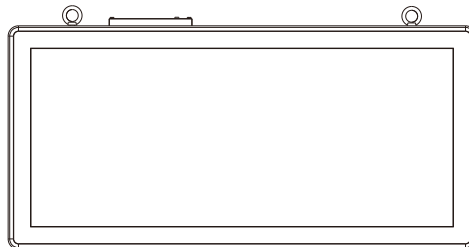

BC252L25

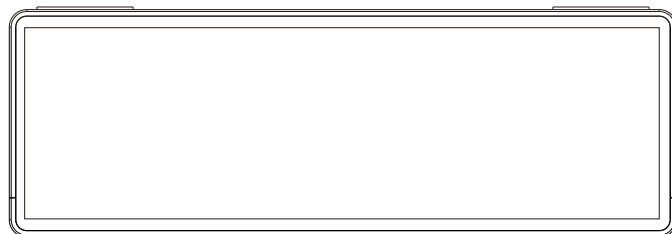

BC252L29

四、技术参数

产品型号	BC252L25	BC252L29
供电电源	DC12V	
供电电压	DC12V	
最大功耗	75W	
工作温度	-10°C to 50°C	
工作湿度	10% to 95%	
联网接口	RJ45 10M/100M	
安装方式	悬挂安装	
整机尺寸	648*310*60.6mm	763.2*260.2*60.6mm
预埋盒尺寸	-	

五、故障分析与排除

如系统不正常，断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理销售商或厂家，不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

为维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	LCD走廊显示屏无显示	电源供电问题	检查电源供电是否正常
2	无法同步时间	网络不通	检查网线是否接触不良
3	呼叫信息没有在中文屏上显示	护士站软件没打开	在护士站的电脑上打开护士站软件，并保持运行状态

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	